



Wiederverwendbare Neutralelektroden (NE)
REF: 360226, 360228
Zusätzliche Sicherheitsinformation

- Die NE ganzflächig auflegen und mit einem Klett-Band sicher befestigen. Für große NE ggf. zwei Bänder verwenden.
 - Die NE nicht über metallischen Implantaten anlegen! Metallische Implantate (Endoprothesen, Spiralen, etc.) sollten nicht im Strompfad zwischen aktiver Elektrode und NE liegen.
 - NE nicht auf oder direkt neben Körperpiercings anbringen! Piercings sollten nicht im Strompfad zwischen aktiver Elektrode und NE liegen.
 - Die NE nicht auf Narbengewebe, hervorstehende Knochen oder stark behaarte Hautareale anlegen! Ggf. Hautareal rasieren (NE aber nicht über durch Rasur wunden oder verletzten Stellen anbringen).
 - NE mindestens 15 cm von einer EKG Elektrode beabstandet anlegen!
 - Kein Elektrodengel unter die NE geben! Flüssigkeitsreste (z.B. von Desinfektionsmitteln) vor Anlegen der NE sorgfältig entfernen.
 - Nach Umlagerung des Patienten NE auf nach wie vor vollständige, korrekte Platzierung überprüfen
 - Bei Verwendung hoher HF-Leistungen (> 100 Watt) ist einer geteilten, d.h. überwachten, Einmal-NE der Vorzug zu geben.
- NE mit der langen Kante zum OP-Feld hin anlegen! Position der NE siehe Fig. 1.

Bei Nichtbeachten dieser Hinweise können Gefährdungen für den Patienten (z.B. Verbrennungen) die Folge sein!

Die Hinweise zur Anwendung der HF-Chirurgie in der Gebrauchsanweisung des HF-Chirurgie-Gerätes sind ebenfalls unbedingt zu beachten!

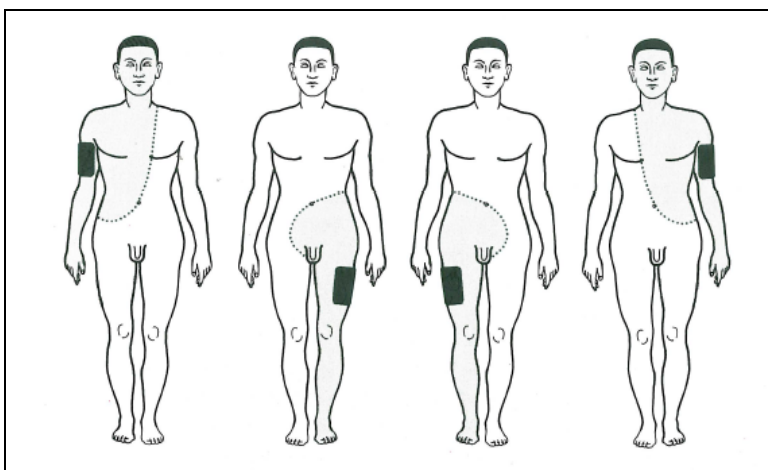


Fig. 1: Positionierung der NE in Abhängigkeit des Operationsgebietes

Quelle: Farin, G

