

# SuperGliss® non-stick Bipolare Pinzetten

Bitte an die Sterilabteilung weiterleiten!



Bei Bedarf verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Tuch, um eventuelle Rückstände zu beseitigen. **Verzichten Sie** auf den Einsatz von Drahtbürsten, Kratzschwämmen, Skalpelln o.ä.



Pinzette nicht auseinanderbiegen.




Das Material der Spitzen kann durch Kontakt mit Reiniger und Desinfektionsmitteln dunkel werden, diese Oxidschicht ist biokompatibel und unbedenklich.



Schützen Sie immer die Spitzen und Schenkel der Pinzetten, da sie weicher als Stahl sind.



Bei Bedarf verwenden Sie zum Schutz des Instrumentes bitte die optional erhältlichen Lagerungstrays.

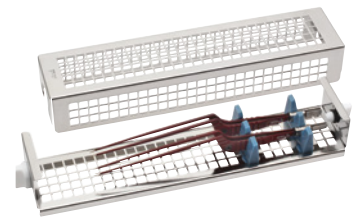

Kleinere farbliche Veränderungen der roten Beschichtung sind im Normalfall unbedenklich.



Die gesamte Wiederaufbereitung umfasst die Vorreinigung, die Reinigung/Desinfektion und die Sterilisation. Die umfassenden Informationen zur Wiederaufbereitung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Nationale Richtlinien und Bestimmungen sind zu beachten!

© Sutter Medizintechnik GmbH · Änderungen vorbehalten · REF 1431 - V02



PRECISION ELECTROSURGERY  
Made in Germany

SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH  
TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY  
TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30  
WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE