


# Masterpiece™ non-stick Bipolare Pinzetten

Bitte an die Sterilabteilung weiterleiten!



Bei Bedarf verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Tuch, um Rückstände zu beseitigen. Verzichten Sie auf Drahtbürsten, Kratzschwämme, Skalpelle o.ä.

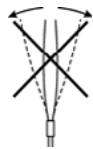

Pinzette nicht auseinanderbiegen.



Zum Schutz des Instrumentes verwenden Sie bitte die Lagerungstrays.



Die gesamte Wiederaufbereitung umfasst die Vorreinigung, die Reinigung/Desinfektion und die Sterilisation. Die umfassenden Informationen zur Wiederaufbereitung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Nationale Richtlinien und Bestimmungen sind zu beachten!