

Calvian endo-pen® Bipolare Klemmen

Bitte in die Sterilabteilung weiterleiten!



Reinigen Sie das Instrument mit einer weichen Bürste bis visuell (Lupe!) keine Restkontamination mehr zu sehen ist.




Dieses Instrument muss und kann nicht zerlegt werden.



Nicht in Wasserstoffperoxid (H₂O₂) einlegen.



Zum Schutz des Instrumentes verwenden Sie bitte die Lagerungstrays.

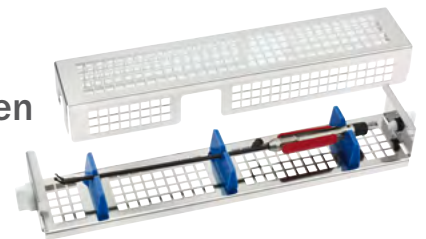

Schließen Sie die Lumina der Instrumente unter Verwendung der Luer-Lock-Anschlüsse am Spülanschluss des RDG* an.

*Reinigungs- und Desinfektionsgerät



Die gesamte Wiederaufbereitung umfasst die Vorreinigung, die Reinigung/Desinfektion und die Sterilisation. Die umfassenden Informationen zur Wiederaufbereitung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Nationale Richtlinien und Bestimmungen sind zu beachten!